

Alerta de Seguridad 0010

Equipo de Electrocirugía de uso General

Código de Reporte: 0010

Mayo, 1996

Equipo Médico: Equipo de Electrocirugía ERBE[16-137]

Fabricante: Erbe ElectroMedizin Erboton T 400C

Problema:

Paciente del sexo femenino 28 años, la cual fue sometida a una intervención quirúrgica (laparoscopia diagnóstica) por sospecha de embarazo ectópico, recibiendo quemaduras en su pierna derecha las cuales requirieron tratamiento al ser detectadas posteriormente en sala.

El daño provocado estuvo relacionado con los accesorios y cables defectuosos que provocaron pases de corriente alterna a través del paciente con lesiones en sitios localizados por debajo del electrodo indiferente (o de retorno) el cual no estaba bien colocado.

Acciones:

1. Examinar la unidad de electrocirugía y sus accesorios antes del acto quirúrgico para detectar posibles defectos.
2. Cumplir con las instrucciones descritas por el fabricante.
3. Instrumentar el adiestramiento del personal médico y de enfermería en estos procedimientos.

Fuente de Información: SNS

Distribuidas: Coordinadores de Seguridad, Jefes de Servicio, Enfermería, Electromedicina

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.

Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM.

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

Teléfono: Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

E-Mail: rem@cceem.sld.cu

Fax: 638-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira
Directora