

# **Alerta de Seguridad 0012**

## **Esterilizadores de Vapor**

**Código de Reporte: 0012**

**Febrero, 1997**

**Equipo Médico:** Esterilizadores de Vapor, [13-748] conocidos como Autoclaves de Mesa; Marca MEDNIF; Modelos YXQ-DY-220Fy YXC-DY-250 F.

**Fabricante:** Procedente de República Popular China

### **Problema:**

Durante el proceso de esterilización de material de acupuntura en un Consultorio del Médico de la Familia ocurrió la explosión de la Autoclave, proyectándose la puerta. El operador del equipo era el propio médico, quien se encontraba atendiendo a un paciente en la consulta.

No se produjeron daños personales por no encontrarse personal personal durante la explosión.

### **Resultados de la investigación:**

Durante el proceso de investigación de este incidente se pudo comprobar que dicho equipo en varias ocasiones había presentado problemas con el control de presión, que era inseguro, que se regulaba y en ocasiones, con un proceso de esterilización solamente, perdía la regulación y el técnico la reparaba. No se pudo precisar que la válvula de seguridad funcionara en el momento del incidente.

Además se efectuaron intercambios técnicos y reuniones con el Suministrador, Importador, Centro Nacional de Electromedicina, Direcciones de Atención Primaria, Higiene y Enfermería para el análisis del problema y determinar la estrategia a seguir.

Así mismo se conoció que las deficiencias técnicas de estos equipos se repiten según la información aportada por las provincias; no siendo este un incidente aislado.

En general, la calidad del diseño de este equipo es deficiente.

### **Acciones:**

1. Detener el uso de este equipo en el Sistema Nacional de Salud, hasta tanto concluya todo el proceso de investigación del mismo.

### **Fuente de Información: SNS**

**Distribuidas:** Coordinadores de Seguridad, Directores Provinciales de Salud, Electromedicina.

**El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.**

***Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM.***


Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.  
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

**Teléfono:** Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

**E-Mail:** [rem@cceem.sld.cu](mailto:rem@cceem.sld.cu)

**Fax:** 638-1930

Aprobado por:

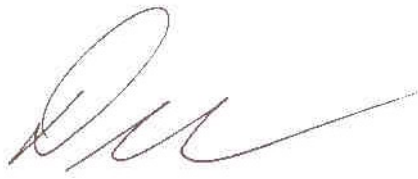

Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira  
Directora