

Alerta de Seguridad 0016

Cateteres Venosos Centrales

Código del Reporte: 0016

Septiembre, 1996

Equipo medico: Catéteres Venosos Centrales [10-729], Catálogo No.3832721 y 3832621.

Fabricante: Becton-Dickinson Vascular Access

Problema:

Una paciente femenina, de 30 años de edad, en una Unidad de Quemados, donde por su estado requirió de cateterismo para canalizarle una vena profunda (yugular interna derecha), después de introducir el cateter la guía metálica se desprendió, por lo que rápidamente hubo que extraer la aguja y volver a canalizar con otro equipo por el peligro de que se introdujera en la luz del vaso la guía metálica. Este evento trajo como consecuencias peligro para la vida de la paciente.

Resultados de la investigación:

En el proceso de investigación de este evento se contactó con la fuente, donde se comprobó que en otros casos se ha detectado que la guía metálica viene ya desprendida del conector de control de flujo y en otros la misma se desprende durante el proceso de introducción del Catéter, por la que parecen ser problemas de calidad en el proceso de fabricación. Además, en algunos casos en el etiquetado, no se indica la fecha de vencimiento del producto.

Por otra parte se contactó con La Empresa Distribuidora de este producto, donde se pudo comprobar que su adquisición ha sido por donación del Plan de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea; se obtuvo relación de los Centros Asistenciales a los que les fue distribuido.

Acciones:

El personal médico deberá:

1. -Verificar que en el etiquetado del producto aparece la fecha de vencimiento.

2. - En el momento que vaya a aplicar a un paciente el tipo de cateter que posee guía metálica, deberá asegurarse de que dicha guía esté bien sujeta al conector de control de fluido (flow)

Fuente de Información: SNS

Distribuidas: Coordinadores de Seguridad, Jefes de Servicio

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.

Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM
Unidad de Vigilancia

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

Teléfono: Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

E-Mail: rem@cceem.sld.cu

Fax: 638-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira
Directora