

## ***Alerta de Seguridad 0024***

### ***Jeringas 5 mL***

**Código de Reporte: 0024**

**Mayo, 1997**

**Equipo Médico:** Jeringas [ 13-929 ], conocidas como jeringuillas; de Shangai Injector Works; fecha de fabricación: 930402 y 930405, con capacidad de 5 ml;

**Fabricante:** fabricadas en la República Popular China.

#### **Problema:**

Jeringuillas, utilizadas en el área de medicina nuclear para inyectar material radiactivo a los pacientes; al manipularlas el líquido pasa por los bordes de la goma del émbolo, produciéndose derrame del mismo. Por el tipo de material manipulado, puede producirle contaminación radiactiva al técnico

#### **Resultados de la investigación:**

En el proceso de investigación de este evento se contactó con la Fuente, se visitó el Departamento donde ocurrió el mismo, confirmándose su ocurrencia en reiteradas ocasiones con ese tipo de jeringuillas; causado por un mal funcionamiento, como consecuencia de la mala calidad del producto. Se tomó como medida interna no utilizarlas más en esta actividad. Además se nos informó que no se han vuelto a recibir en la institución.

#### **Acciones:**

1. No utilizar jeringuillas de este Fabricante en los Departamentos de Medicina Nuclear para esos fines.

**Fuente de Información:** SNS

**Distribuidas:** Coordinadores de Seguridad, Servicio de Medicina Nuclear y Servicio, Enfermería.

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos. Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM.

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.  
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

**Teléfono:** Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

**E-Mail:** [rem@cceem.sld.cu](mailto:rem@cceem.sld.cu)

**Fax:** 638-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira  
Directora