

Alerta de Seguridad 0034

Catéteres, para Hemodiálisis

Código del Reporte: 0034

Octubre, 1998

Equipo medico: Catéteres, para Hemodiálisis [15-022],REF 1132.11 con Lote: GO1A09.

Fabricante: Laboratories Pharmaceutiques BP 7-95440 ECOUEN-FRANCE, CE

Problema :

El Servicio de Nefrología de una unidad asistencial plantea que este tipo de Catéter de doble luz para Hemodiálisis presenta dificultades con el flujo arterial y el flujo venoso; lo que provoca traumas en los pacientes a los que se les aplica, ya que se debe retirar el mismo y colocarle otro, pudiéndoles ocasionar daños serios.

Resultados de la investigación:

En el proceso de investigación se nos confirmó que esas dificultades se presentan indistintamente cuando el Catéter se utiliza por primera vez o después ya con el reuso. Además se confirmó que en todos los casos estos Catéteres se reutilizan varias veces, que se esterilizan en cámara de óxido de etileno.

No se han reportado ni detectado eventos similares en otros servicios de dicha especialidad, los cuales fueron consultados. Según expertos se pudo conocer que en este tipo de incidente pueden influir otros factores como la técnica a emplear, la manipulación, la anticoagulación y la esterilidad. Por otra parte el Fabricante no recomienda su reutilización.

Acciones:

1. No reutilizar; sólo en casos imprescindibles tomando todas las medidas que minimicen los riesgos de esta práctica.
2. Ser rigurosos en todo el proceso de manipulación.

Fuente de Información: SNS

Distribuidas: Coordinadores de Seguridad, Jefes de Servicio

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.

Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM

Unidad de Vigilancia

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

Teléfono: Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

E-Mail: rem@cceem.sld.cu

Fax: 638-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira
Directora

!