

Alerta de Seguridad 0038

Piezas de Mano, Dentales

Código del Reporte: 0038

Enero, 1999

Equipo medico: Piezas de Mano, Dentales [11-161], Marca KAVO, Modelo 629, No. de Serie 18802.

Fabricante: Alemania

Problema:

Paciente femenina, de 54 años de edad, la cual al ser atendida en una Clínica Estomatológica por un Especialista que al estar preparándole una cavidad en un diente posterior se le desarmó en la boca la Pieza de Mano de Airotor por haberse ido la tapa. Provocando esto la salida del rotor, quedando en la parte posterior de la lengua; poniéndose en peligro la vida de la paciente, aunque en este caso no se la trago ni tampoco la aspiró.

Resultados de la investigación:

En el proceso de investigación nos entrevistamos con el personal de la institución, donde se plantea que este evento ha ocurrido en varias ocasiones y que en su ocurrencia pueden influir los más de 14 años de explotación de esos equipos, así como maltratos, dificultades con las piezas de repuesto, intenso régimen de trabajo, entre otros. Cuando ocurre este tipo de evento se ha reportado al Centro de Electromedicina que son los autorizados para su reparación.

Fueron consultados los técnicos de Electromedicina que brindan el servicio y donde se plantea que ese equipamiento sufre mucho maltrato por el personal que lo manipula, y además está estipulado como parte del mantenimiento preventivo que el asistente dental o el estomatólogo la lubriquen según las "Instrucciones básicas para la lubricación de las piezas de Mano de Airotor".

Acciones:

1. Chequear periódicamente el estado técnico de la pieza de mano.

2. Dar el mantenimiento preventivo periódicamente según las “Instrucciones básicas para la lubricación de las Piezas de Mano de Airotor”, emitidas en Octubre de 1998 por las Direcciones Nacionales de Estomatología y Electromedicina.
3. Al detectar cualquier fallo suspender su uso y reportarlo al Centro de Electromedicina correspondiente.

Fuente de Información: SNS

Distribuidas: Coordinadores de Seguridad, Estomatólogos y Asistentes

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.

Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM
Unidad de Vigilancia

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

Teléfono: Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

E-Mail: rem@cceem.sld.cu

Fax: 638-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira
Directora

!